

ENA Soft FLOW

(CS) ENA Soft FLOW

ENA Soft FLOW je světlem tuhnoucí materiál pro dočasné výplně. ENA Soft FLOW je elastický materiál pro dočasné výplně. Snadno se odstraňuje, vcelku, bez poničení preparace. ENA Soft FLOW je vhodný i pro dlouhodobější dočasné výplně, neboť zachovává tvar zubu po celou dobu aplikace.

VÝHODY

- jednoduché nanášení, je nelepavý;
- snadné odstranění - vcelku;
- vhodný pro inleje & onleje;
- pevné a dlouhodobé výplně.

Složení

- Diuretan dimetakrylát, směs isomerů; 2-Hydroxyetyl metakrylát. Camphorquinone.

Indikace

ENA Soft FLOW se používá pro:

- dočasné výplně, zvláště pak na inleje a onleje

Kontraindikace

Nezpolymerovaná pryskyřice by mohla způsobit alergickou reakci pokožky. Nutno používat rukavice. V případě již prokázané alergie na některou ze složek tento přípravek nepoužívejte.

Vedlejší účinky

Vdechnutí: V případě vdechnutí okamžitě konzultujte s lékařem.

Kontakt s pokožkou: Umyjte mýdlem a opláchněte dostatečným množstvím vody. Vyhledejte dermatologa.

Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči dostatečným množstvím tekoucí vody a poté máčejte pod očními víčky čistou vodou po dobu více než 15 minut. Vyhledejte oftalmologa.

Čeho se vyvarovat

Materiály, které obsahují fenoly (např. eugenol) zabraňují polymeraci kompozit. Nepoužívejte tyto materiály jako podložky.

Návod k použití

- 1) Odšroubovat víčko a nasadit aplikační kanylu (o průměru minimálně 1,2 mm);
- 2) Preparovat kavitu;
- 3) Očistit a osušit kavitu;
- 4) Nanést dostatečné množství ENA Soft FLOW, a to v závislosti na rozsahu restaurace;
- 5) Zkontrolovat okluzi a odstranit přebytky;
- 6) Polymerovat světlem – vrstvu 4 mm po dobu 10 sekund, vrstvu 8 mm po dobu 20 sekund. Použít led lampu (např. CLEDPLUS – Micerium), nebo halogenovou lampu o výkonu vyšším než 1000 mW/cm² (je-li výkon lampy v rozmezí 550 mW/cm² až 1000 mW/cm², je nutné čas polymerace zdvojnásobit).
- 7) Dočasnou výplň lze snadno vyjmout nástrojem: odstraní se vcelku.

Použití a skladování

Skladujte při teplotě 2°C - 27°C. Nepoužívejte po expirační době (viz štítek na stříkačce).

Braňte kontaminaci balení. Používejte při pokojové teplotě.

Zdravotní prostředek, pouze pro dentální použití: ukládejte z dosahu dětí. Během používání zatáhněte píst zpět, zabráníte tím zatuhnutí hmoty v kanyle, a uzařete. Po použití uzavřete stříkačku víčkem.

Chraňte před přímým světlem.

Bezpečnostní listy jsou na webové stránce: www.micerium.com



MICERIUM S.p.A.

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)

Tel. (+39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887 970

e-mail: hfo@micerium.it • www.micerium.com

