

ENA Soft FLOW

(EL) ENA Soft FLOW

Το ENA Soft FLOW είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο προσωρινό υλικό σφραγισμάτων. Το ENA Soft FLOW είναι ένα ελαστικό υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις. Έχει το πλεονέκτημα της εύκολης απομάκρυνσής του μονοκόμματα, χωρίς να προκληθεί ζημιά στην παρασκευή. Το ENA Soft FLOW είναι επίσης κατάλληλο για μακροπρόθεσμες αποκαταστάσεις επειδή διατηρεί τέλεια το σχήμα του δοντιού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- εύκολο στην εφαρμογή του: δεν κολλάει
- εύκολο να αφαιρεθεί μονοκόμματα
- κατάλληλο για ένθετα και επένθετα
- δυνατά και μακράς διάρκειας σφραγίσματα

Σύνθεση

Διμεθακρυλική διουρεθάνη, μείγμα ισομερών. 2-μεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας. Καμφοροκινόνη.

Ενδείξεις

Το ENA Soft FLOW χρησιμοποιείται για προσωρινά σφραγίσματα, ειδικά για ένθετα και επένθετα.

Αντενδείξεις

Η απολυμέριστη ρητίνη μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργία. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε κάποια από τα συστατικά.

Παρενέργειες

Στην περίπτωση εισπνοής συμβουλευτείτε άμεσα έναν σύμβουλο υγείας.

Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε άμεσα με σαπούνι και άφθονο νερό και στη συνέχεια συμβουλευτείτε ένα δερματολόγο.

Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με αρκετό νερό και στη συνέχεια ρίξτε καθαρό νερό μέσα στα βλέφαρά σας για περισσότερο από 15 λεπτά. Έπειτα συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται

Τα υλικά που εμπριέχουν φαινόλες (όπως η ευγενόλη) μπορούν να αναστείλουν τον πολυμερισμό της ρητίνης. Αποφύγετε τη χρήση τέτοιων υλικών ως επένδυση.

Οδηγίες χρήσεως

- 1) Ξεβιδώστε το καπάκι και τοποθετήστε μία βελόνα (ελάχιστη διάμετρος 1,2mm).
- 2) Προετοιμάστε την κοιλότητα.
- 3) Καθαρίστε και στεγνώστε την κοιλότητα.
- 4) Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα ENA Soft FLOW, αναλόγως του μεγέθους της αποκατάστασης.
- 5) Ελέγξτε τη σύγκλιση και στη συνέχεια απομακρύνετε τις περίσσιες.
- 6) Φωτοπολυμερίστε 10 δευτερόλεπτα για πάχος 4mm και 20 δευτερόλεπτα για πάχος 8mm, χρησιμοποιώντας μία λάμπα led (όπως η CLEDPLUS – Micerium) ή λάμπα αλογόνου με δύναμη περισσότερη των 1000 mW/cm² (ανάμεσα στα 550 mW/cm² και τα 1000 mW/cm² διπλασιάστε τον χρόνο)
- 7) Η αποκατάσταση μπορεί να αφαιρεθεί με ένα εργαλείο· βγαίνει ολόκληρη.

Χρήση και αποθήκευση

Μην αποθηκεύετε κάτω από τους 2°C και πάνω από τους 27°C. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την ημερομηνία λήξης (δείτε την ετικέτα στη σύριγγα). Αποφύγετε τη μόλυνση της συσκευασίας. Χρησιμοποιείτε το υλικό σε θερμοκρασία δωματίου.

Ιατρικό υλικό μόνο για οδοντιατρική χρήση: κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αφού έχετε εξάγει το υλικό, επαναφέρετε την άτρακτο της σύριγγας, ώστε να αποφύγετε να πληγεί το υλικό, και κλείστε το καπάκι. Μετά τη χρήση κλείστε το καπάκι και κρατήστε το κλειστό. Αποφύγετε άμεση έκθεση στο φως του ηλίου.

MSDS διαθέσιμο στο website: [HYPERLINK "http://www.micerium.com"](http://www.micerium.com) www.micerium.com



MICERIUM S.p.A.

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)

Tel. (+39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887 970

e-mail: hfo@micerium.it • www.micerium.com

