
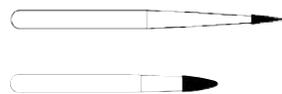


CS2LV (MC 506) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR RESTAURATIONS POSTERIEURES DIRECTES ET INDIRECTES EN COMPOSITE

PREPARATION

- Fraises Conique à angle interne arrondi 849-524-012 et 849-524-016 (dents courtes), 855-524-014 et 856-534-016 (dents longues) pour les préparations cavitaires.
- Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 849-514-012 et 849-514-016 (dents courtes), bague rouge 855-514-014 et bague jaune 856-504-018 (dents longues) pour les finitions cavitaires.
- Fraises Flamme 859-534-012 pour les préparations interproximales et bague jaune 859-504-014 pour les finitions interproximales.
- Fraises Olive 368-524-025 pour les préparations occlusales et bague rouge 368-514-025 pour les finitions occlusales.
- Fraises Tonneau 811-534-040 pour les réductions occlusales et bague jaune 811-504-040 pour les finitions occlusales.
- Fraises Boule carbure de tungstène 014 et 018 pour l'élimination de la dentine pathologique.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

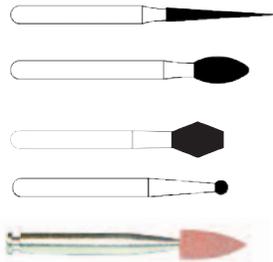

FINITION DES COMPOSITES

- Fraise Flamme bague rouge 853-514-008 pour la finition occlusale interproximale.
- Fraise Olive bague jaune 390-504-016 pour la finition occlusale.

POLISSAGE

- Pointe montée en silicone diamanté grise SHINY 15 pour le prépolissage.
- Brossette SHINY S pour le polissage, à imprégner au préalable de la pâte diamantée SHINY A de 3 µM, puis SHINY B de 1 µM.
- Roue en feutre SHINY F pour le lustrage de la restauration, à utiliser avec la pâte SHINY C en oxyde d'alumine.



MICERIUM S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) - Italy
Tel. +39 0185 7887 880
Fax +39 0185 7887 970
email:hfo@micerium.it



CS1LV (MC 312) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR COMPOSITES ANTERIEURS DIRECTS


PREPARATION

- Fraises Boule 801-524-012 (pour émail fin) et 801-524-014 (pour émail plus épais) pour la préparation du chanfrein vestibulaire.
- Fraises Boule bague rouge 801-514-012 (pour émail fin) et 801-514-014 (pour émail plus épais) pour la finition de la préparation du chanfrein vestibulaire.
- Fraises Cylindrique lisse à bout travaillant 839-524-012 (pour émail fin) et 839-524-014 (pour émail plus épais) pour l'épaulement à 90° au niveau interproximal et palatin/lingual.
- Fraises Cylindrique lisse à bout travaillant bague rouge 839-514-012 (pour émail fin) et 839-514-014 (pour émail plus épais) pour la finition de l'épaulement à 90° au niveau interproximal et palatin/lingual.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.



FINITION DES COMPOSITES

- Fraise Flamme 861-524-012 pour les corrections grossières.
- Fraise Flamme bague rouge 861-514-012 pour les corrections vestibulaires.
- Fraise Olive 368-524-025 pour les corrections palatines.
- Fraise Olive bague rouge 368-514-025 pour les corrections palatines.
- Fraise Flamme bague rouge 853-514-008 pour les corrections vestibulaires et incisales.
- Pointe montée en carbure de silicium verte SHINY 21 ou Fraise Flamme 30 lames carbure de tungstène (9904) pour les corrections fines.

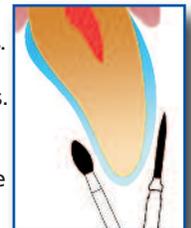



TRAITEMENT DES SURFACES ET POLISSAGE

- Fraise Flamme bague rouge 853-514-008 pour la macrogéographie (verticale).
- Pointe montée en silicone diamanté blanche SHINY 14 pour le prépolissage.
- Pointe montée en carbure de silicium verte SHINY 21 pour la microgéographie (horizontale).
- Brossette SHINY S pour le polissage, à imprégner au préalable de la pâte diamantée SHINY A de 3 µM, puis SHINY B de 1 µM.
- Roue en feutre SHINY F pour le lustrage de la restauration, à utiliser avec la pâte SHINY C en oxyde d'alumine.

CS3LV (MC 507) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR FACETTES EN COMPOSITE ET EN CERAMIQUE ET POUR COIFFES SANS INTRASTRUCTURE METALLIQUE



PREPARATION POUR COIFFE

- Fraises Conique à angle interne arrondi 847R-524-016 (dents courtes) et Congé large 850-524-016 (dents longues) pour les préparations de moignons.
- Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 847R-514-016 et Congé large 850-514-016 pour la finition des préparations de moignons.
- Fraises Olive 368-524-025 pour la préparation des faces palatines et bague rouge 368-514-025 pour la finition des préparations.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

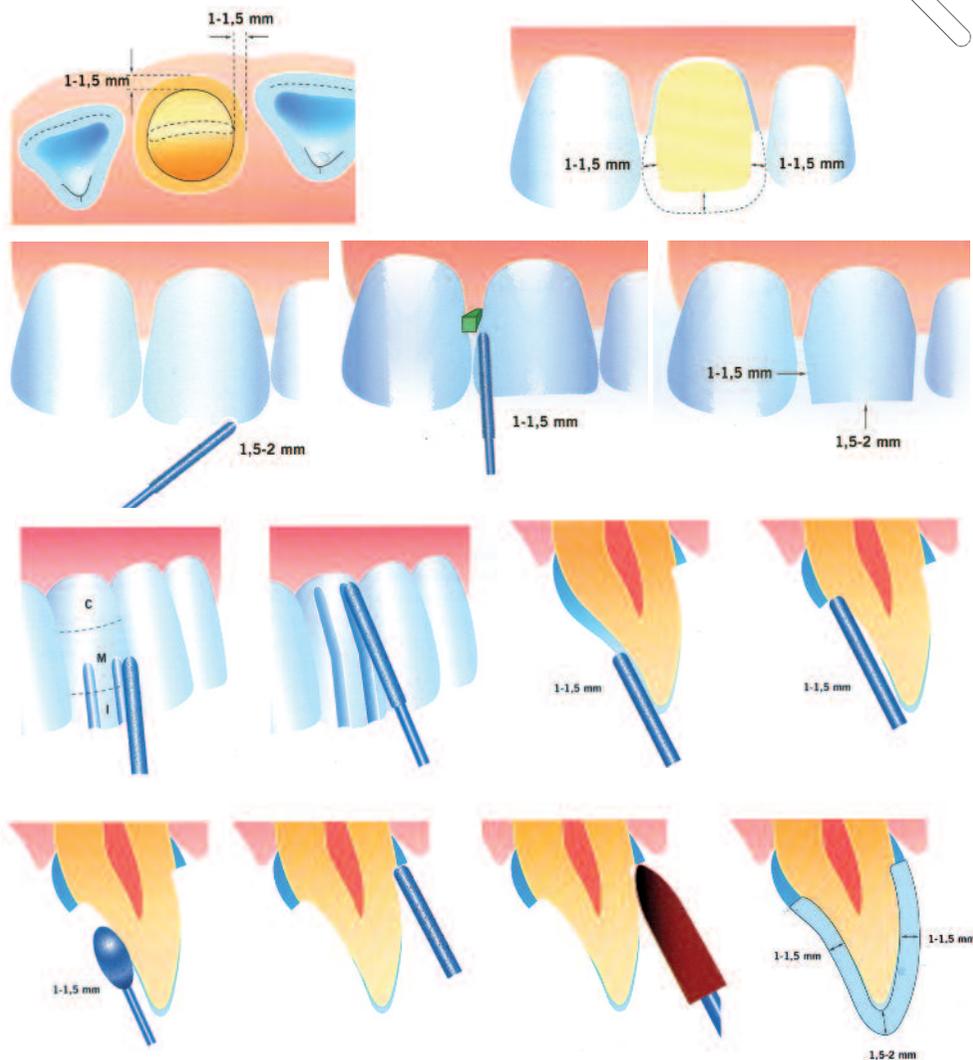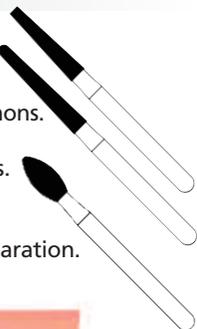

PREPARATION POUR FACETTE

- Fraises Boule 801-524-012 (pour émail fin) et 801-524-016 (pour émail plus épais) pour la préparation du chanfrein de la facette au niveau proximal. Fraises Boule bague rouge 801-514-012 (pour émail fin) et 801-514-016 (pour émail plus épais) pour la finition de la préparation du chanfrein.
- Fraises Conique à angle interne arrondi 847R-524-016 et Conique à bout plat 848-524-012 pour le sulcus vestibulaire en suivant les profils d'émergence incisale et les différentes inclinaisons. Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 847R-514-016 et Conique à bout plat 848-514-012 pour la finition des préparations.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

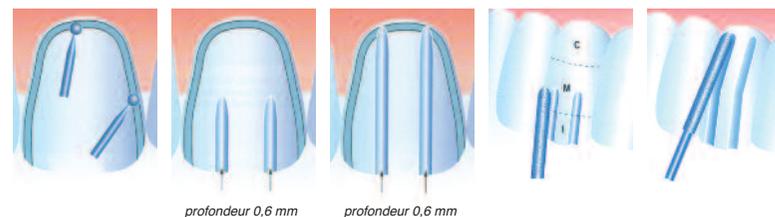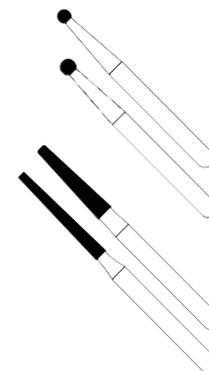

CS4LV (MC 508) KIT DE PREPARATION ET DE FINITION A 50-90° POUR COIFFES METALLIQUES

PREPARATION

- Fraises Cylindrique à bout pointu 878-524-012 et 878-524-016 (dents courtes), 879-524-012 et 879-524-016 (dents longues) pour les préparations coronaires de couronnes céramo-métalliques à 50°. Fraises Cylindrique à bout pointu bague rouge 878-514-012 et 878-514-016 (dents courtes), 879-514-012 et 879-514-016 (dents longues) pour la finition des préparations.
- Fraises Congé large 850-524-018, Conique à bout plat 847-524-016 et 848-524-018 pour les préparations coronaires à 90°. Fraises Congé large bague rouge 850-514-018, Conique à bout plat bague rouge 847-514-016 et 848-514-018 pour la finition des préparations.
- Fraises Tonneau 811-524-037 pour les réductions occlusales et bague rouge 811-514-037 pour les finitions occlusales.
- Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant 839-524-016 pour la limite proximale à épaulement à 90° et la préparation linguale/palatine. Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant bague rouge 839-514-016 pour la finition des préparations.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

