

TENDER PINK

ÄSTHETIK IN VOLLENDUNG



Tender Pink Pink ist ein einzigartiges System für Praxis und Labor zur Reproduktion der Gingiva.

4 Farben: Pink Dark, Pink Light, Pink Orange, Pink Transparent.

Der Farbeffekt kann durch Verwendung von Stain Flow Blue erhöht werden. Die Farben White, Red und Violet können ebenfalls beigemischt werden.

Stain Flow



Pink Transparent



Pink Light




Pink Dark



Pink Orange



Charakterisierung von Totalprothesen und Implantatarbeiten

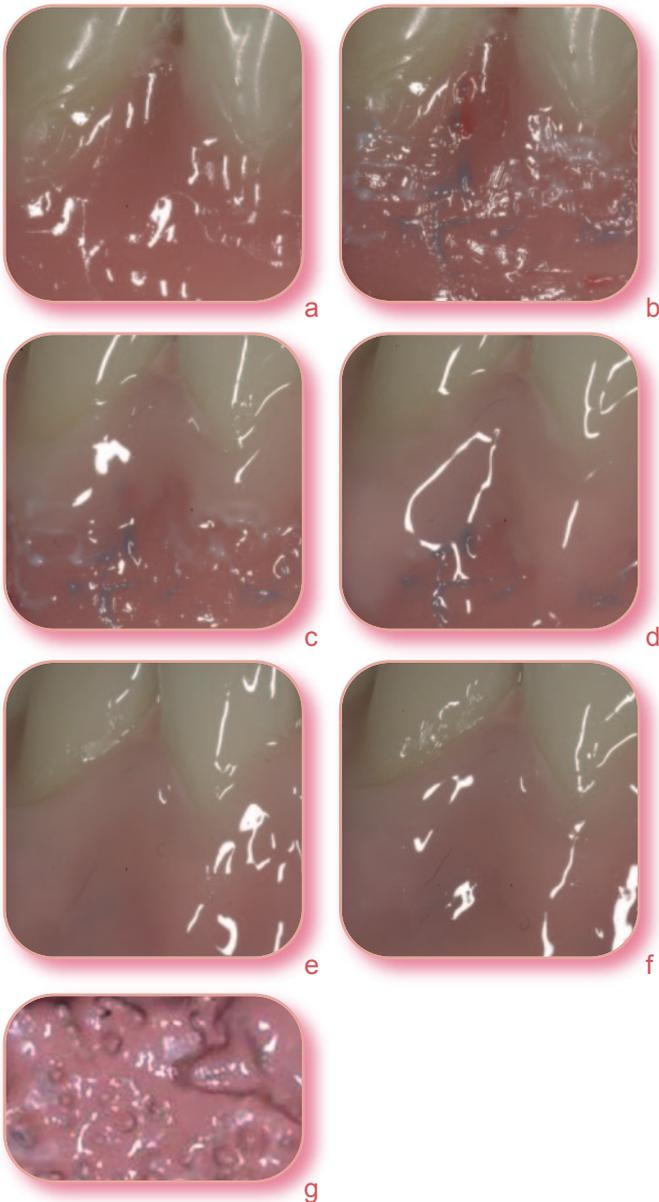

- a. Temp Bonding Fluid ermöglicht die Verbindung von Methyl-Methacrylaten mit lighthärtenden Kompositen.
- b. Stain Flow **White** erhöht die Opazität und Farbwirkung der **ischämischen Papille** und der von Knochen dominierten Bereiche, Stain Flow **Red** untermauert die Wirkung der rosafarbenen Komposite und simuliert **Blutgefäße**, Stain Flow **Blue** verstärkt die Effekte von **Foramen** und **kleinen Venen**. Neuer Stain **violett** ist ideal zur Reproduktion von tief liegenden Venen in der Gingiva. Es kann die Farbwirkung des Tender **Dark** Komposites erhöhen, wenn es beigemischt wird.
- c. Tender Pink **Transparent** imitiert die **zervikalen Bereiche**, in denen die Gingiva den Zahn, nicht aber den Knochen bedeckt. In Kombination mit White oder Red Stain wird die Frenumfarbe, die sich von der Gingivafarbe unterscheidet, nachgebildet.
- d. Tender Pink **Light** reproduziert die **wurzelnahen Bereiche**, in denen das Gewebe fest und transparent ist.
- e. Tender Pink **Dark** dient zur Reproduktion der freien, kaum am Knochen haftenden Gingiva, die **gut durchblutet ist** und einen rot-blauen Schimmer im Bereich des Foramens zeigt. In Kombination mit Stain Blue und Red kann die Farbe der Adern des natürlichen Zahnfleisches verstärkt werden.
- f. Tender Pink **Orange** (verfügbar auch als **Flow**) wird als erste Schicht oder in Kombination mit Stain Flow White zur Reproduktion der typischen Farbe bei **Knochenprominenz im Randbereich** genutzt.
- g. Tender Pink **Opaque**, das auch den primer, enthält, wird zum Abdecken der Metallstruktur verwendet.

Tender Pink

Das System zur Charakterisierung und Reproduktion der Gingiva

Opaker

ETOP Self Adhesive Pink Opaque

Farben zur Reproduktion der Gingiva

COSSTAIN1N WHITE stain refill

COSSTAIN3N BLUE stain refill

COSSTAINR RED stain refill

COSSTAINV VIOLET stain refill

Tender Pink Komposit mit niedriger Abrasion

ETP Tender Pink Orange

ETPL Tender Pink Light

ETPD Tender Pink Dark

ETPT Tender Pink Transparent

Tender Pink Flow mit niedriger Abrasion

ETFP Tender Pink Orange Flow



TENDERPKIT Kit Tender Pink

- 1 Tender Pink Opaque
- 3 Stains (blue, red, white)
- 4 Tender Pink Komposite: Orange - Light - Dark - Transparent

ETPK Kit Tender Pink

- 4 Tender Pink Komposite: Orange - Light - Dark - Transparent

Verbund Methyl-Metacrylat zu Komposit

TEMPF Temp Bonding Fluid

Verbund Keramik zu Komposit

ETBOND Tender Bonding

ETOCLEAR Tender Paste Opaque Clear